



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.39.003.A № 62606

Срок действия до 16 июня 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.", КНР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64236-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

Р 50.2.032-2004

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июня 2016 г. № 755

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"26" 06 2016 г.

Серия СИ

№ 025151

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107

Назначение средства измерений

Измерители артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107 предназначены для косвенного определения максимального (систолического) и минимального (диастолического) артериального давления путем измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107 основан на неинвазивном измерении манометром прибора давления воздуха в компрессионной манжете в момент появления (принимается за систолическое артериальное давление) и исчезновения (принимается за диастолическое артериальное давление) прослушиваемых тонов Короткова. При этом давление воздуха в манжете создается и регулируется с помощью ручного пневматического нагнетателя (груши), а появление и исчезновение тонов Короткова прослушивается с помощью стетоскопа.

Конструктивно измерители артериального давления CS Medica состоят из мембранного манометра, манжеты компрессионной, нагнетателя давления (груши). Соединение манжеты с манометром и пневматическим нагнетателем осуществляется эластичными резиновыми трубками. Манжета компрессионная представляет собой пневмокамеру, помещенную в чехол с застежкой для фиксации на плече. Измерители артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-107 снабжены фонендоскопом, головка которого закреплена на манжете, имеющей скобу для удобного крепления на руке без посторонней помощи. Измеритель модели CS-106 поставляется как с фонендоскопом, так и без него. В измерителе модели CS-107 манометр совмещен с пневматическим нагнетателем, снабженным клапаном стравливания и дополнительным клапаном быстрого сброса воздуха из манжеты.

Измерители артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107 имеют одни и те же метрологические характеристики, отличаются конструктивными особенностями, комплектацией, массой и цветовым оформлением.

Общий вид измерителей артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107 представлен на рисунках 1 - 4.



Рисунок 1 - Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-105



Рисунок 2 - Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 без фонендоскопа



Рисунок 3 - Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106 с фонендоскопом



Рисунок 4 - Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-107

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики измерителей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
1	2
Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст.	от 20 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в манжете, мм рт.ст.	± 3
Цена деления шкалы манометра прибора, мм рт.ст.	2
Масса прибора в чехле, кг, не более: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CS-105 ▪ CS-106 без фонендоскопа ▪ CS-106 с фонендоскопом ▪ CS-107 	0,48 0,40 0,48 0,54
Размер манжеты, см: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CS-105, CS-107 ▪ CS-106 	от 22 до 38 от 24 до 42
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность при 25 °С, %	от +10 до +40 от 30 до 85
Срок службы приборов (без пневмокамеры), лет, не менее	8
Срок службы составных частей прибора (исключая манометр), год, не менее	1

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-105, в комплекте:

1. Манометр.
2. Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B, SL).
4. Оголовье фонендоскопа.
5. Головка фонендоскопа.
6. Y-образный звукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
8. Мягкий футляр для хранения.

Измеритель артериального давления CS Medica модель CS-106, в комплектации: модель CS-106 (без фонендоскопа):

1. Манометр.
2. Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B, SL).
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
5. Мягкий футляр для хранения.

модель CS-106 (с фонендоскопом):

1. Манометр.
2. Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B, SL).
4. Оголовье фонендоскопа.
5. Головка фонендоскопа.
6. Y-образный звукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
8. Мягкий футляр для хранения.

Измеритель артериального давления CS Medica CS-107, в комплектации:

1. Манометр.
2. Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B, SL).
4. Оголовье фонендоскопа.
5. Головка фонендоскопа.
6. Y-образный звукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
8. Мягкий футляр для хранения.

Поверка

осуществляется по документу Р 50.2.032-2004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».

Основное средство поверки:

- установка для поверки каналов измерений давления и частоты пульса УПКД-2, регистрационный № 44539-10, (диапазон задания значений давления воздуха от 20 до 400 мм рт.ст.; пределы допускаемой абсолютной погрешности задания значений давления воздуха $\pm 0,5$ мм рт.ст.).

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) на руководство по эксплуатации.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям артериального давления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107

1 ГОСТ 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996) «Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования».

2 ГОСТ 31515.2-2012 (EN 1060-2:1996) «Сфигмоманометры (измерители артериального давления) неинвазивные. Часть 2. Дополнительные требования к механическим сфигмоманометрам».

3 Техническая документация фирмы «Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.», КНР.

Изготовитель

Фирма «Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.», КНР
№2 Building 10, Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town, Dantu District, 212143 Zhenjiang City, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СиЭс Медика» (ООО «СиЭс Медика»)
Юридический адрес: 127006, г. Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Почтовый адрес: 125413, г. Москва, а/я 7
Тел./факс: + 7 (495) 363-16-52, + 7 (495) 363-16-56
info@csmedica.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)
119361, г. Москва, ул. Озерная, 46
Тел./факс: +7 (495) 437-56-33/ +7 (495) 437-31-47
E-mail: vniiofi@vniiofi.ru; web-сайт: http://www.vniiofi.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-14 от 23.06.2014 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

06

2016 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

4/четыре ЛИСТОВ(А)

