

Сделано в России

**АППАРАТ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО
И ИНФРАКРАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ**

«ВИТАФОН-2»

**Руководство по эксплуатации
и
Рекомендации по применению**

**АППАРАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
№ 29/06040501/3166-02 от 06 февраля 2002г.**



ООО «Витафон»

*Система менеджмента качества разработки, производства и реализации
медицинских изделий предприятия соответствует требованиям стандартов
ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003*

СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Общие сведения.....	3
Назначение аппарата.....	3
Основные технические данные.....	3
Комплект поставки.....	4
▲ Меры безопасности.....	4
Устройство аппарата.....	4
Функциональные возможности аппарата.....	5
Подготовка аппарата к работе и порядок работы.....	7
♦ Подготовка к работе и включение аппарата.....	7
♦ Включение часов и установка точного времени	7
♦ Подключение преобразователей.....	7
♦ Ввод параметров, начало процедуры, прерывание процедуры	7
♦ Программирование процедуры при использовании виброфона одиночного.....	8
♦ Программирование процедуры при использовании ИК-излучателя.....	8
♦ Программирование процедуры при использовании двух виброфонов.....	9
♦ Программирование процедуры при использовании виброфона и ИК-излучателя.....	10
♦ Автоматический запуск процедур.....	11
♦ Автоматические режимы с периодически повторяющимся включением.....	12
Условия эксплуатации, транспортирования и хранения.....	13
Возможные неисправности и методы их устранения.....	14
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	15
Физиологический механизм виброакустического воздействия.....	15
Области воздействия	16
Лечебное действие инфракрасного излучения	16
Продолжительность процедур.....	16
Выбор параметров РЕЖИМ и ЭНЕРГИЯ	17
Время и продолжительность лечения	17
Привыкание и перерывы между курсами	17
Сочетание с лекарственной терапией	17
Ощущения	17
Правила установки преобразователей	18
Противопоказания к применению	18
Алфавитный перечень показаний к применению.....	19
Литература и видеоматериалы по виброакустической терапии	77
Список иллюстраций:	
Рис. 1. Внешний вид аппарата и сменных преобразователей.....	5
Рис. 2. Характер изменения мощности ИК-излучения.....	6
Рис. 3. Характер изменения частоты микровибрации.....	6
Рис. 4. Установка виброфонов под углом 90° относительно друг друга.....	18
Рис. 5. Установка виброфона типа «матрац» при лечении распространенного остеохондроза	27
Рис. 6. Установка виброфона типа «матрац» при профилактике пролежней.....	40
Рис. 7. Области воздействия А, А1, В, В2.....	61
Рис. 8. Области воздействия С, С10, G, М, М1, М2, М3, М4	3-я стр. обложки
Рис. 9. Области воздействия D1, D2, D3, E1, E10, E12, E2, E20, E22, E3, E30, E32, E4, K, F	3-я стр. обложки

ВНИМАНИЕ!

Перед применением аппарата необходимо внимательно изучить настоящие Руководство по эксплуатации и Рекомендации по применению, которые содержат сведения и указания, необходимые для правильной, безопасной и эффективной эксплуатации аппарата.

При покупке аппарата требуйте:

- проверки работоспособности;
- проверки комплектности;
- наличия заполненного Гарантийного талона и присутствия в нем штампа продавца и даты продажи.

