

## УХОД И ГИГИЕНА

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю при помощи любой чистящей жидкости. Чтобы удалить загрязнения, прибор необходимо поместить в моющий раствор минимум на 30 минут, затем промыть прибор чистой водой. Также можно мыть пикфлоуметр в посудомоечной машине при температуре до +65°C.

**УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО.**

Для очистки пикфлоуметра можно использовать спиртовые салфетки, при этом особо тщательно нужно очищать мундштук. При явном загрязнении пикфлоуметр использовать нельзя.

### **Использование одним пациентом в домашних условиях:**

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю.

Не использовать прибор дольше 3 лет!

### **Использование в клинике (требуется одноразовый мундштук с адаптером):**

После каждого пациента необходимо очистить пикфлоуметр. Для каждого пациента нужно использовать новый одноразовый мундштук или бактериальный фильтр. Рекомендуется замена пикфлоуметра после одного года использования или после 650 пациентов.

### **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора!

- Не пытайтесь разобрать прибор, это может привести к тому, что пикфлоуметр будет показывать неправильные результаты!
- Если пикфлоуметр был поврежден, его нужно заменить.
- Храните устройство в сухом и чистом месте.

### **ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:**

Пикфлоуметр Vitalograph имеет гарантию один год.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Точность:  $\pm 10$  L/min или  $\pm 10\%$  показаний

Воспроизводимость:  $\pm 10$  L/min или  $\pm 5\%$  показаний

Диапазон измерений: 50–800 L/min

Условия использования:

Температура воздуха 10–40°C

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Температура: 0–50°C

Относительная влажность воздуха: 10–95%

**Vitalograph®**

Your respiratory partner

## Пикфлоуметр VITALOGRAPH с принадлежностями

Для наблюдения за функцией дыхания (пиковая скорость выдоха)

Артикул 031G3982

Per.Уд. №ФСЗ 2011/10975



0086

**Vitalograph (Ireland) Ltd.,**

Gort Road Business Park, Ennis, Clare, Ireland

e-mail: sales@vitalograph.ie

Тел: (065) 686 41 00

Уполномоченный представитель в РФ:

**ООО «ПАРИ синергия в медицине»**

117418, г. Москва, а/я 16

Тел/факс: +7(495)718 75 91

e-mail: sales@parinebuliser.ru

**Vitalograph®**

Your respiratory partner

*my PEF*



**ПИКФЛОУМЕТР**

Прибор для индивидуальных ежедневных наблюдений за патологическими состояниями дыхательных путей

