



220-240V~50Hz 85-105W



mod. BD7100  
**BREMED**<sup>®</sup>  
Todi (PG) - Italy  
[www.bremed.com](http://www.bremed.com)

Rev. 2: 12/2012

**BD7100**

**Facial Sauna &  
Steam Inhaler**



## ВНИМАНИЕ!

- **Перед тем как приступить к использованию устройства ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.**
- **Данная инструкция входит в комплект поставки и включает в себя важные сведения о работе устройства.**
- **Храните инструкцию в надежном месте!**
- **При передаче подогревателя третьему лицу передайте инструкцию вместе с устройством.**

### Польза пара при работе с лицевой сауной

Обработка лица паром является основным элементом в уходе за женским лицом. Она незаменима для правильного ухода за кожей. Такая обработка лица подготавливает кожу к таким процедурам как увлажнение, глубокая очистка пор или обработка питательными кремами. Пар открывает поры и улучшает кровообращение, чем замечательно готовит кожу для любых косметологических процедур. Использование лицевой сауны перед очисткой и увлажнением кожи лица значительно повышает эффективность косметических препаратов.



### Внимание

- Не пользуйтесь устройством при заболеваниях сердца, воспаленных угрях, экземе или псориазе.
- Устройство следует применять лишь после сборки паровой маски.
- При повреждении шнура электропитания, его следует заменить у производителя или в центре технического обслуживания, поскольку для ремонта требуются специальные инструменты и/или детали.
- Храните устройство вне досягаемости детьми.
- **Никогда не разбирайте устройство во время его работы! Это может повлечь ожог горячей водой или сильно нагретыми деталями.**
- Длительность процедуры не должна превышать 20 минут.
- Сразу же после завершения использования устройство следует выключить и отключить от сети электропитания.
- Не направляйте пар в глаза или на иные чувствительные к теплу области тела. При воздействии пара на лицо глаза всегда необходимо держать закрытыми.

### Осторожно

- Не размещайте и не храните устройство там, откуда оно может упасть в резервуар с водой или в ванну.
- Не пользуйтесь устройством, принимая ванну.
- Если во время процедуры вода будет израсходована, устройство следует немедленно выключить, не допуская его работы без воды, и, позволив ему остыть, опорожнить резервуар.



### Использование лицевой сауны (рис.1)

- Подключите устройство к розетке сети электропитания. Убедитесь в том, что лицевая сауна установлена на твердой, плоской поверхности.
- Залейте в резервуар устройства воду, используя мерный стакан (рис.11)
- Не наполняйте резервуар выше метки "MAX" (рис.2), нанесенной на резервуаре.
- Закрепите паровую маску, повернув ее по часовой стрелке (рис.1).
- Нажмите кнопку выключателя устройства. При этом включается красный индикатор. Вода нагревается и из устройства начинает выходить пар. Максимально допустимое количество воды в контейнере обеспечивает парообразование в течение ~ 20 минут.
- Усядьтесь перед устройством. Наклонитесь вперед так, чтобы лицо оказалось над паровой маской.
- Не слишком приближайте лицо к маске, сохраняя расстояние (рис.7).
- Длительность использования устройства не должна превышать 20 минут в день. В неделю следует выполнять 2-3 процедуры.
- В случае испарения всей воды или при необходимости прекращения процедуры, нажмите кнопку для выключения устройства.
- Индикатор гаснет (рис.3).
- После процедуры необходимо ополоснуть лицо холодной водой. Затем нанесите на лицо увлажняющую маску или используйте предпочитаемые очищающие средства, кремы.
- Перед тем как слить из резервуара остатки воды, устройство необходимо отключить от сети электропитания.
- Позвольте устройству остыть в течение 10-15 минут перед отсоединением паровой маски.
- Отсоедините паровую маску, повернув ее против часовой стрелки (рис.9).
- Слейте оставшуюся в резервуаре воду, перевернув устройство над раковиной.

### Распылитель (рис.5)

#### Уникальный распылитель обеспечивает удобное использование устройства.

- Откройте крышку распылителя.
- Вставьте в распылитель хлопчатобумажную салфетку и закройте крышку.
- Правильная работа распылителя зависит от его корректной установки.
- Включите устройство и воздействуйте паром на лицо.
- Выключите устройство, отключите его от сети электропитания и позвольте остыть в течение 10-15 минут после завершения процедуры.

#### Регулируемый парообразователь

- Для ускорения нагревания можно закрыть парообразователь (рис.3).
- Можно переключить парообразователь для регулировки интенсивности пара, исходящего из контейнера (рис.12).
- Когда парообразователь закрыт, пар исходит из соответствующего отвода (рис.5).
- **Никогда не прикасайтесь к клапану пара и не блокируйте его.** Это может привести к ожогу (рис.10).

## Использование назальной маски (рис. 6)

- Не натягивайте назальную маску на нос слишком плотно. Соблюдайте рекомендованную дистанцию (рис. 8).
- Длительность процедуры не должна превышать 10 минут в день. Число процедур не должно превышать 2-3 в неделю.
- В случае полного испарения воды или, если вы решили приостановить процедуру, следует выключить устройство с помощью выключателя.
- При этом гаснет индикатор (рис.3)
- Перед сливом воды из контейнера устройство необходимо отключить от электросети.
- Перед отсоединением от устройства паровой маски необходимо выждать в течение 10-15 минут, пока она остынет.
- Отсоедините назальную паровую маску.
- Слейте остатки воды, удерживая перевернутое устройство над раковиной.

## Очистка устройства


- Во избежание загрязнения и для удаления осадка рекомендуем чистить устройство после каждого использования.
- Не используйте для очистки пластмассовых деталей спирт, ацетон, бензин или абразивные чистящие вещества.
- Перед очисткой устройство необходимо отключить от электросети.
- Дождитесь, пока устройство остынет полностью, а затем слейте из резервуара воду.
- Очистите внешнюю поверхность устройства мягкой, влажной тканью, а затем протрите насухо.
- Не используйте для очистки каких-либо острых предметов. Вы можете повредить нагревательный элемент.
- Не промывайте основание устройства под проточной водой, поскольку в нем находятся электрические детали.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие не должно утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Вне зависимости от того, содержат или не содержат электрические или электронные устройства токсичных материалов, во избежание загрязнения окружающей среды, пользователи должны утилизировать их в специализированных сборочных пунктах. Рекомендуем проконсультироваться по месту приобретения или в местных органах власти об утилизации таких устройств.



Bremed Limited  
www.bremed.com

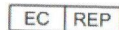

Bremed Italy S.r.l.  
Loc. Duesanti Voc. Palombaro 69,  
06059, Todi (PG), Italy.

