



## Фермы с муравьями AntPlanet!

Фермы с муравьями от производителя! Большие и маленькие! Быстро доставим!

antplanet.ru



ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ РЕКОМЕНДУЕТ РЕГУЛЯРНО  
ИЗМЕРЯТЬ СВОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

**CS**  
Окс Медика

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**  
**МЕХАНИЧЕСКИЙ**  
**модель CS Medica CS-106**  
**(с фонендоскопом)**



**При покупке требуйте правильного заполнения  
гарантийного талона, находящегося в середине  
настоящего Руководства по эксплуатации!**

**Благодарим Вас за покупку!**

### СОДЕРЖАНИЕ

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Руководство по эксплуатации  | 3              |
| 2. Адреса региональных торговых представительств и центров технического обслуживания в России | 12             |
| 3. Гарантийный талон  | между стр. 8-9 |



**Комплектность поставки**

В комплекте: манометр, нагнетатель давления (груша), манжета (одна из перечисленных типов: H, D, P, S, B), оголовье фонендоскопа, головка фонендоскопа, Y-образный звукопровод фонендоскопа, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, мягкий футляр для хранения.

Прибор CS-106 снабжен манжетой, которая может устанавливаться на руке окружностью 24–42 см, способ установки — «нахлест».

Груша прибора выполнена из мягкой, эластичной резины, которая позволяет производить нагнетание воздуха в пневмокамеру манжеты без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля воздушного клапана от попадания в них пыли и мелких частиц.

Механизм воздушного клапана имеет игольчатый вентиль, позволяющий производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью. Металлические трубки

**ВНИМАНИЕ:**

- Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство прежде чем начать эксплуатацию измерителя артериального давления, чтобы Вы могли правильно использовать все его возможности.
- Внимательно прочитав это Руководство, обязательно сохраните его.
- Чтобы получить конкретную информацию о Вашем артериальном давлении, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ.

оголовья прибора снабжены мягкими, эластичными оливами, которые плотно прилегают к ушным отверстиям, не травмируя их.

Измеритель артериального давления механический CS Medica CS-106 соответствует требованиям безопасности, предусмотренным для данного изделия медицинской техники в Российской Федерации.

— **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04071  
от 07.10.2010 г. Срок действия не ограничен.

— **СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ  
РОССИИ**

Декларация о соответствии # РОСС CN.АГ75.Д42221  
от 10.10.2013 г., срок действия до 09.10.2018 г.  
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4),  
ГОСТ Р 51959.1-2002, ГОСТ 51959.2-2002.

— **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств  
измерений и допущен к применению в Российской Федерации.



































