

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
MED-2000
RUS™

Пингвин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Модель: CN-02WF

Компрессорный ингалятор (небулайзер)

— MED-2000 RUS —



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретения компрессорного ингалятора (небулайзера) MED-2000 RUS. Надлежащая эксплуатация и должный уход за устройством обеспечат долгие годы надежной службы. Настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации и изучить характеристики устройства.

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Ингаляторы (небулайзеры) компрессорные MED-2000 RUS относятся к категории медицинских устройств, работающих по принципу распыления лекарственных препаратов при помощи сжатого воздуха. Компрессор генерирует поток воздуха, который посредством прозрачной трубки подается в небулайзерную камеру. Оказавшись в небулайзерной камере, воздух преобразует необходимый лекарственный препарат в аэрозоль для облегчения его попадания в дыхательные пути.




**ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ
РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

КОМПРЕССОРНЫЙ ИНГАЛЯТОР (НЕБУЛАЙЗЕР)
MED - 2000 RUS

Пингвин мод. CN-02WF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
компрессорного ингалятора (небулайзера)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

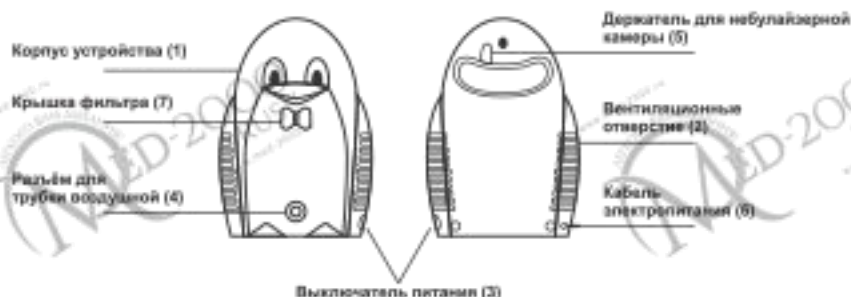

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

! Внимательно прочитать предупреждения, содержащиеся в данной инструкции и хранить её для последующих консультаций.

- Хранить прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
- Хранить вдали от детей компоненты упаковки (картонная коробка, пластиковые пакеты и т.д.)
- Не использовать 100 % эфирные масла.
- Использовать прибор для аэрозольных ингаляций с лекарственными средствами только по предписанию врача.
- Не использовать соединения и аксессуары, не предусмотренные производителем.

11 12		Стаканчик (небулайзерная камера)	8		Трубка воздушная
14		Распылитель (пистон) А Распылитель (пистон) В Распылитель (пистон) С	10		Маска для взрослых
10		Маска для детей	9		Мундштук Соска-мундштук
19		Насадка для носа	18		Держатель для маски
16		Переходник	15		Фильтры

- Не использовать прибор при наличии воспламеняемых смесей, таких как кислородные и т.д.
- Не использовать прибор, если после снятия упаковки имеются повреждения, которые могут быть спровоцированы при транспортировке. Обратиться в Центр Технического Обслуживания при любых сомнениях.
- Не использовать прибор при повреждении кабеля.
- Хранить прибор и кабель вдали от источников тепла.
- Не засорить воздухозаборник прибора.
- Рекомендуется персональное использование аксессуаров.
- После процедуры не оставлять остатки лекарственных средств в небулайзере.
- Чистить, а также производить операции по очистке или техническому обслуживанию только после извлечения питающего кабеля из розетки.
- Не погружать прибор в воду или другую жидкость и не использовать его при мытье или душе.
- Хранить прибор в сухом, защищенном от влаги месте
- При загрязнении фильтра необходимо заменить его на новый.
- В случае случайного падения прибора в воду необходимо извлечь кабель из розетки. Извлечь прибор из воды и в дальнейшем не использовать его.
- Не использовать прибор мокрыми руками.
- Убедиться, что прибор расположен на устойчивой и прочной поверхности для предотвращения падений и переворачиваний.
- Не использовать прибор во время сна.
- Не засорить решетки охлаждения.
- В случае неисправности или плохой работы прибора необходимо извлечь вилку из розетки. Ремонт должен производиться только в уполномоченных Центрах Технического Обслуживания.
- После проведения процедуры необходимо удалить все части прибора, представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать их для игры.
- Установка должна производиться согласно инструкциям производителя. Ошибочная установка может причинить вред людям, животным или предметам, по отношению к которым производитель не может быть признан ответственным.
- В случае не использования, прибор должен быть отключен от сети.

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанию врача) при невозможности завершения терапии в случае отсутствия электрической энергии или неисправности.
- Терапия всегда предписывается врачом, который назначает тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедур.
- Прибор предусмотрен для максимального периода постоянной работы 30 минут. После данного периода постоянной работы прибор должен быть выключен на 30 минут.

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Острые и хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей.
2. Астма
3. Аллергия
4. ХНЗЛ
5. Прочие респираторные заболевания

ВНИМАНИЕ!

- При выборе лекарственного препарата, определении дозы, частоты проведения процедуры и времени ингаляции всегда соблюдайте указания врача.
- Разрешается использовать только лекарственные препараты, рекомендованные врачом или фармацевтом.
- Во время процедуры запрещается направлять небулайзер в глаза, т.к. некоторые лекарственные препараты, используемые для распыления, могут привести к повреждению глаз.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ингаляции противопоказаны:

1. При повышении температуры свыше 37,5° С;
2. При носовых кровотечениях или склонности к ним;
3. При заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности.

3. ВОЗМОЖНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При использовании компрессорного небулайзера побочные действия выявлены не были.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОГО НЕБУЛАЙЗЕРА

Предельные значения благоприятных условий работы для медицинского устройства – от +10 °С до +40 °С, от 10% до 95% относительной влажности.

Максимально допустимое время установления рабочего режима с момента включения – 1 минута. Для компрессорного небулайзера предусмотрен перемежающийся режим работы. На устройство нанесена маркировка «Номинальный рабочий цикл: 30 мин вкл. / 30 мин выкл.» Длительность контакта пациента с изделиями, входящими в состав устройства (стаканчик (небулайзерная камера), маска для взрослых, маска для детей и т.д.) – 10 мин ≤ t ≤ 30 мин.

ВАЖНО:

- Рекомендуется персональное использование насадок и аксессуаров для ингаляционной терапии, входящих в состав устройства.
- Перед первичным использованием требуется тщательно очистить и продезинфицировать небулайзерную камеру и иные изделия, входящие в состав устройства, следуя процедуре очистки, описанной в разделе «ОЧИСТКА».
- При невозможности завершения терапии, в случае отсутствия электропитания в сети или неисправности устройства, рекомендуется иметь альтернативный прибор или лекарственное средство (по предписанию врача).
- Терапия всегда проводится врачом, который назначает тип лекарственного средства, дозировку и график проведения процедур.
- Из соображений гигиены каждому пациенту рекомендуется использовать отдельный комплект насадок для ингаляционной терапии и не допускать повторного использования одного комплекта разными пациентами.


- Допустимы изменения количества оборотов двигателя, при этом средние характеристики прибора являются неизменными.
- Производитель, сборщик и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:
 - Сборка, испытание и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
 - Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
 - Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Производитель освобождается от ответственности в случае ущерба при несвойственном, ошибочном или иррациональном использовании прибора и его аксессуаров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Вставить кабель электропитания 6 в розетку, первоначально убедившись в том, что напряжение питания соответствует 220 V.
- Надеть ингалятор 14 (A-B-C), в зависимости, от необходимого режима на форсунку, расположенную в нижней части небулайзера 12.
- Влить лекарственное средство в нижнюю часть небулайзера 12 (см. инструкцию «по эксплуатации небулайзера»).
- Повернуть верхнюю часть небулайзера 11 по направлению часовой стрелки для закрытия небулайзера.
- Сверху надеть на небулайзер респираторную маску 10 или мундштук 9.
- При использовании силиконовой трубки 8, надеть на один из её концов нижнюю часть небулайзера 12.

Другой конец силиконовой трубки 8 присоединить к штекеру соединения трубки 4, расположенному внизу на корпусе 1.

- Включить прибор, расположив выключатель 3 на символ ВКЛ.
- Для выключения расположить выключатель 3 на символ ВЫКЛ.
- Лечение должно производиться сидя, удобно располагаясь в прямом положении. При использовании респираторной маски 10 необходимо, чтобы она плотно прилегла к лицу. Дышать медленно, делая короткую паузу при завершении каждого выдоха и затем, производя быстрый вдох. Мундштук 9 при использовании должен держаться между зубами, сомкнув губы. При этом необходимо дышать ртом.
- Возможно регулирование потока воздуха регулятором 13 (в виде колесика), расположенным в верхней части небулайзера 11.

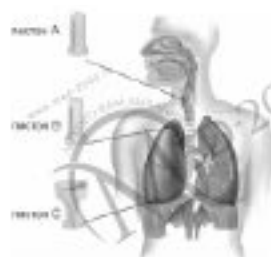

- Если в течение терапии необходима пауза, можно выключить небулайзер посредством выключателя 3. Лечение заканчивается, когда распылитель начинает подавать аэрозоль неустойчиво.
- При завершении лечения необходимо тщательно произвести чистку так, как описано в разделе «ЧИСТКА». При завершении лечения и не использования прибора вынуть вилку из сети питания.

ЧИСТКА

- Вынуть вилку из розетки. После каждого применения выполнять чистку всех используемых аксессуаров (8, 9, 10, 11, 12 и 14)
- Для очистки небулайзера прочитать раздел «ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕБУЛАЙЗЕРА». Очень Важно: респираторная маска 10, соединительная силиконовая трубка 8, мундштук 9, части небулайзера 11 и 12 не должны помещаться в кипящую воду. Чистка может производиться при помощи специальных химических дезинфицирующих средств.

В домашних условиях, возможно, промыть аксессуары в мыльном растворе и затем в проточной воде. Затем при необходимости произвести дезинфекцию.

- Дезинфицирующий агент - 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства. Возможен и другой способ дезинфекции аксессуаров пригодный для воздействия на полипропилен, из которого изготовлены аксессуары.
- После чистки все аксессуары необходимо тщательно просушить.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Компрессор не требует смазки или технического обслуживания.
2. Запрещается самостоятельно вскрывать или пытаться осуществлять ремонт изделия, так как в этом случае дальнейшее функционирование изделия надлежащим образом не может быть гарантировано. Несоблюдение данных инструкций приведет к аннулированию гарантийных обязательств.
3. Несанкционированный ремонт изделия приведет к аннулированию гарантийных обязательств. Сервисное обслуживание не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия покрывает возможные дефекты производства или материалов в случае, если они не были нарушены пользователем или неуполномоченным персоналом.
- Данная гарантия не распространяется на: аксессуары, являющиеся предметом износа, к которым относятся позиции с 8-14 в главе «Комплектация». Ущерб, нанесённый прибору при неправильном использовании. Случайный ущерб, такой как ушибы, падения, транспортировка по причинам, не зависящим от производителя.
- В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантийному талону чек или счёт - фактуру на покупку. В другом случае, гарантия не является действительной и расходы на ремонт относятся на счёт клиента.

- В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранять неизменённую конфигурацию первоначального выбора. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу действительность гарантии.
- Расходы по транспортировке - за счёт клиента.
- **ВНИМАНИЕ:** Из гигиенических соображений замена и возврат исключены, так как данный прибор является оборудованием индивидуального использования.
- **ВНИМАНИЕ:** гарантия является действительной только при наличии гарантийного талона, а так же чека или счет - фактуры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ небулайзера	> 7 мл
РЕЖИМ РАБОТЫ	> 30 мин вкл. / 30 мин выкл
ВЕС ПРИБОРА	> 1,64 кг
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА	> 227x175x119 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИБОРА	> 230 V
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	> 180 ВА макс
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 2,5 бар (200 Кпа)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПТОУС	> 8 л/мин
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	Тип F1 5A 250В
СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	0,2 - 0,6 мл/мин
РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ	Диаметр от 1 до 10 мкм (шт) (Зависит от пистонов)
МОЩНОСТЬ	> 180 ВА макс
ЧАСТОТА	> 50 Гц
УРОВЕНЬ ШУМА	< 60 дБА (фоновый шум > 40 дБА)
IPX0	> Приборы типа В > Прибор не защищён от инфильтрации жидкостей > Внимание! Обращайтесь к прилагаемой документации
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	Мин : -30 °С Макс : + 70 °С
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ	> Макс: RH 90 %


Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии инструкции с гарантийным талоном, а так же чека или счёт - фактуры.

Срок гарантии - 5 лет с даты продажи.

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а так же на последней странице

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРА

Сертификат Соответствия Европейским стандартам CE, нормам Европейского респираторного общества по аэрозольтерапии EN 13544-1

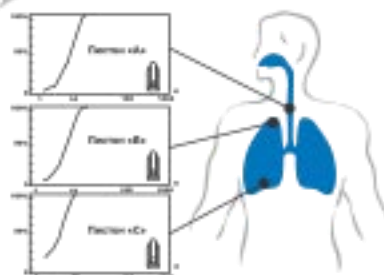

Универсальный небулайзер - Andy Flow

это ингаляционный прибор, производящий аэрозоль с определенными характеристиками, предназначенный для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей. Принцип operation небулайзера Andy Flow «А», «В», «С» позволяет получать аэрозоль с оптимальным размером частиц для того чтобы достигнуть максимальной эффективности лечения полости и поверхности слизистой дыхательного тракта. Выбор пластины и ингаляционного средства производится в согласии Вашего лечащего врача, который придерживается следующих терапевтических рекомендаций:

Профилактика и лечение верхнего отдела дыхательного тракта

пластина «А» - размер частиц до 90% составляет 5-10 мкм



Лечение трахеита - бронхитального тракта

пластина «В» - размер частиц до 90% составляет 3-5 мкм



Лечение глубоко расположенных отделов дыхательного тракта - пластина «С» - размер частиц до 90% составляет 1-3 мкм



CE



Рис. В

Чистить небулайзер после каждой процедуры !!!
Перед частой разборке небулайзера на две части (рис. А).

Надлежащим образом промыть 14 на форсунку в нижней части небулайзера 12 (рис. В).

Выборите конкретный пластин для конкретной процедур, например:

пластина «А» - для терапии верхнего дыхательного тракта,

пластина «В» - для трахеи и бронхов,

пластина «С» - для лечения глубоко расположенных отделов дыхательного тракта - легких и альвеол.

Присоедините для дыхательных форсунок



Рис. А



Заполните нижнюю часть небулайзера лекарством, предназначенным врачом, как показано на (рис. С).

Внимание: мерные риски на нижней части небулайзера имеют только показательные значения.



Закройте верхнюю часть небулайзера 11 по часовой стрелке.



Присоединение нижней части небулайзера 12 к соединительной силиконовой трубке 8.



Выберите аксессуары для предстоящей процедуры - респираторную маску 10 или мундштук 9.



Регулировка потока аэрозоля при помощи клапана 13.

СОДЕРЖАНИЕ И ЧИСТКА



Рис. H

После использования разберите небулайзер на две части, промойте их теплой водой, хорошо ополосните, протрите мягкой тканью и дайте просохнуть. (рис. H)

Для стерилизации опустите небулайзер в холодный стерилизующий раствор.

При чистке не кипятить!

Храните в сухом проветриваемом месте и берите от прямых солнечных лучей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Храните небулайзер далеко от детей, потому что он содержит мелкие частицы, которые ребенок может проглотить.

Небулайзер имеет европейский сертификат CE 0434 9342 EN 13544-1 и классифицируется, как медицинский прибор для аэрозолетерапии и индивидуального использования.

Ремонт небулайзеров (ингаляторов) производит:

ООО «Мед-Холдинг»

ПО АДРЕСУ: 119361 г Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а

тел.: +7(495)981-88-73, 8 800 550 9792

E-mail: med-2000@med-2000.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия		Печать продавца М.П.
Модель		
Серийный номер		
Дата продажи		
Номер чека/накладной		
Подпись продавца		

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 5 - ти лет со дня продажи изделия и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. В случае невыполнения гарантийных обязательств в течение 14 дней со дня сдачи Товара в гарантийную мастерскую, или в случае 3-кратного гарантийного ремонта изделия и следующей поломки в течение гарантийного срока не по вине покупателя, покупатель имеет право на замену сделанного товара новым того же типа или на возврат денег.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия покрывает возможные дефекты производства компрессорного блока и материалов в случае, если они не были нарушены пользователем или уполномоченным персоналом.
2. Данная гарантия не распространяется на изделия, входящие в состав устройства, а также на ущерб, нанесенный устройству при неправильном использовании, случайный ущерб (падения при транспортировке по причинам, не зависящим от производителя).
3. В случае неисправности прибор должен отправляться в уполномоченный Центр Технического Обслуживания, прилагая к гарантийному талону чек или накладную на покупку. В ином случае гарантия не является действительной и расходы на ремонт взимаются с клиента.
4. В случае сдачи для ремонта прибор должен сохранить неизменную конфигурацию первоначального набора. Возможные изменения внутри упаковки ставят под угрозу действительность гарантии.
5. Расходы по транспортировке - за счет клиента.
6. По вопросам ремонта обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а также на последней странице Руководства.

Производитель, сборщики и Центр сервисного обслуживания несут ответственность за безопасность изделия только в случае, если:

1. Сборка, испытания и ремонт были выполнены уполномоченным персоналом.
2. Электрическая сеть соответствует действующим нормативам.
3. Были выполнены все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ:

- Из гигиенических соображений замена и возврат исключены, так как данный прибор является оборудованием индивидуального использования.
- Гарантия является действительной только при наличии гарантийного талона, а также чека или накладной.

(покупатель Ф.И.О.)

(подпись покупателя)

Квитанция № 1 гарантийный талон № _____ от ____ / ____ 20 ____ г

Дата проведения ремонта / ____ / ____ / 20 ____ г Подпись мастера _____

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация блоков компрессорных небулайзеров

В целях защиты окружающей среды запрещается утилизировать устройство в составе бытовых отходов. Утилизация вышедших из строя блоков Ингаляторов (небулайзеров) компрессорных MED-2000 RUS проводится в соответствии с ДИРЕКТИВОЙ 2002/95/ЕС ОБ ОТХОДАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE).

Процедура утилизации компрессорных небулайзеров проводится специализированной компанией и состоит из следующих операций: получение изделия от лечебного учреждения / потребителя, разборка на компоненты, сортировка полученных компонентов по видам вторичного сырья (металлы, пластик, электронный лом) и классам опасности перерабатываемых материалов (отходов).

В случае возникновения вопросов, обратитесь в местные органы власти, ответственные за утилизацию отходов. Являются биологически безопасными отходами.

Утилизация изделий, входящих в состав устройства

Изделия, входящие в состав устройства (стаканчик (небулайзерная камера), трубка воздушная, распылители (пистоны) А, В, С, маска для взрослых, маска для детей, мундштук, насадка для носа, держатель для маски, соска-мундштук, переходник № 1, переходник № 2, фильтр), у которых закончился срок годности, либо неисправные изделия, являются биологически безопасными отходами. Для утилизации обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

У изделия отсутствуют детали, профилактику и техническое обслуживание которых требуется проводить не специалистом. При необходимости ремонта изделия, свяжитесь со службой технического обслуживания клиентов или с официальным дилером. Запрещается разбирать и собирать небулайзер самостоятельно. По вопросам сменных частей устройства обращайтесь к своему медицинскому дистрибьютору.

№	Символ	Описание	№	Символ	Описание
1		Производитель	2	Завод	Место производства
3		Дата производства	4	Модель №	Номер модели
5		Код партии	6	Серийный №	Серийный номер
7		Класс II защиты от поражения электрическим током	8		Электротехнические продукты нельзя смешивать с несортированными бытовыми отходами.
9		Предупреждение	10		Маркировка CE
11	Потребляемая мощность: 1800ВА макс	Потребляемая мощность	12	Вход: 230В/50Гц	Требования к электропитанию
13		Уполномоченный производитель в Европейском Сообществе	14		Рабочая часть, типа ВФ
15	30 мин вкл. / 30 мин выкл.	Для устройства предусмотрен переключающийся режим работы	16	ООО «ВИТТА-Лизинг»	Уполномоченный представитель в РФ
17	Дата упаковки	Сведения о годе и месяце упаковки устройства	18	IP21	Класс ММ по степени защиты от проникания воды и твердых частиц
19		Материал упаковки может быть переработан	20		Ознакомиться с инструкцией по применению
21		Производитель оказывает финансовую поддержку программе «Eco Emballer», занимающейся переработкой отходов	22		Упаковку следует выбросить в урну
23		Не допускать попадания влаги	24		Не допускать попадания прямых солнечных лучей
25		Ограничение температуры (минимальные и максимальные значения)	26		Осторожное обращение с грузом