

Руководство по эксплуатации

ПОРТАТИВНЫЙ МЕШ ИНГАЛЯТОР

AIR MASK



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2595AA, The Hague, Netherlands.

Примечание

1. Добавляйте жидкость до включения устройства
2. Не используйте лекарственные средства, содержащие масло или распыленную жидкость
3. Соблюдайте рекомендации врача по выбору лекарств и режиму их применения
4. Не используйте для небулайзера дистиллированную воду, воду многократной очистки или масляные
5. После каждого применения очищайте устройство
6. После каждого использования насухо вытирайте устройство, чашу для лекарства и комплектующие
7. Не касайтесь мембраны острыми или твердыми предметами в случае обнаружения неисправности
8. Перед первым использованием зарядите устройство

Предупреждения перед использованием и меры безопасности:

1. Посоветуйтесь с вашим врачом при выборе прибора нужного типа для проведения ингаляции.
2. Храните прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
3. Не используйте 100% эфирные масла.



Air Mask - портативный переносной высокотехнологичный ультразвуковой небулайзер, предназначен для лечения и профилактики различных заболеваний дыхательных путей. Принцип работы основан на технологии вибрирующей сетки-мембраны, которая сохраняет частицы ингаляционной жидкости, не давая им распасться. Это обеспечивает проникновение препарата в легкие пациента. Прибор работает на заданной частоте, при которой молекулы лекарства не распадаются и сохраняют свои лечебные свойства. Благодаря этому в прибор можно залить различные лекарственные препараты, том числе гормоны и антибиотики.

Аэрозольная небулайзерная терапия рекомендована при следующих заболеваниях дыхательных путей:

1. Профилактика заболеваний дыхательных путей
2. Бронхиты
3. Ларингиты, тонзиллиты, синуситы
4. Трахеиты
5. Респираторные инфекции
6. Бронхиальная астма
7. Пневмония
8. Другие заболевания дыхательных путей.
9. Легочные инфекции

Противопоказания:

- Ингаляций противопоказаны при:
1. Повышении температуры выше 37,5 С.
 2. При носовых кровотечениях.
 3. При заболеваниях легких и сердца с явлениями выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности.

Предупреждения перед использованием и меры безопасности:

1. Посоветуйтесь с вашим врачом при выборе прибора нужного типа для проведения ингаляции.
2. Храните прибор вдали от детей и людей, не умеющих с ним обращаться.
3. Не используйте 100% эфирные масла.

Этапы при использовании



Откройте крышку чаши для лекарства (будьте аккуратны с уплотнительным кольцом на крышке чаши).



Заполните жидкостью (следуйте указаниям шкалы)



Закройте крышку чаши для лекарства



Подключите маску



Наденьте маску и начните ингаляцию (рекомендуется индивидуально отрегулировать натяжение резинки. Она не должна быть слишком тугой)

Запустите аппарат перед распылением, слегка встряхните уровень чтобы раствор полностью закрыл устройство распылитель.

Примечание: Если синяя лампочка мигает трижды, когда жидкости достаточно, нажмите кнопку один раз чтобы продолжить работу.

Технические характеристики:

Модель: Air Mask
Источник питания: 4,8 В пост. тока (литий-ионные аккумуляторные батареи) или 5,0 В пост. тока с адаптером перем. тока
Потребляемая мощность: <4,0 Вт Скорость распыления: 0,1 мл/мин - 0,9 мл/мин
Размер частиц: Масс-медианный аэродинамический диаметр < 5 мкм
Объем чаши для лекарства: 6 мл (макс)
Рабочая частота: 110 кГц ±10 кГц
Уровень шума: на расстоянии 1 м - 20 дБ
Размер/масса продукта: 68 мм (д) x 66 мм (ш) x 40,5 мм (в) / 57,5 г
Условия эксплуатации: Температура: 5°C-40°C
Относительная влажность: до 80%
Атмосферное давление: (70,0-106,0 кПа)
Условия хранения/транспортировки: Температура: -20°C-50°C;
Относительная влажность: до 80%
Атмосферное давление: 50,0-106,0 кПа

Гарантия

Условия ГАРАНТИИ действительны только при наличии руководства по эксплуатации с гарантийным талоном, а также чека или счёт-фактуры.
 Срок гарантии - 5 лет с даты продажи.
 По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания. Адрес и телефоны ЦТО указаны в гарантийном талоне, а также на последней странице

Сменные части и дополнительное оборудование:
 При неисправности прибора свяжитесь с службой технического обслуживания клиентов или с официальным дистрибьютором.
 По вопросам сменных частей устройства обращайтесь к своему официальному дистрибьютору.


Примечание: Перед зарядкой убедитесь, что подключенная розетка нормально заряжает.

Схема зарядки небулайзера



Примечание: Прибор заряжается независимо. Не заряжайте его совместно с другими электронными устройствами.

Фиксирующий желоб чаши для лекарства

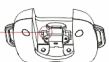

При установке бутылочки с лекарством, проденьте ее вертикально в фиксирующий желоб. Не наклоняйте. Убедитесь, что бутылочка с лекарством плотно прижата.



Внимание: следите за чистотой всех контактных поверхностей и насухо вытирайте их после использования.

Руководство по очистке

1.- Предварительная очистка

1. Снимите компоненты устройства



2. Откройте крышку чаши для лекарства и влейте оставшуюся жидкость (будьте аккуратны с уплотнительным кольцом на крышке чаши).



3. Добавьте необходимое количество тёплой воды (рекомендуется температура не выше 40°C). Не используйте дистиллированную воду или воду многократной очистки.



4. Закройте крышку чаши для лекарства.



5. Вытирайте устройство чистой медицинской марлей после очистки небулайзера. Не касайтесь центральной области мембраны чтобы не повредить ее.



2.- Регулярная очистка

1. Нажмите кнопку и вытащите чашу для лекарства в вертикальном направлении.



Промойте чашу для лекарства изнутри



Промойте разъем небулайзера снаружи



Промойте разъем небулайзера изнутри



Добавьте необходимое количество тёплой воды (рекомендуется температура не выше 40°C) и повторно промойте внутри чаши для лекарства, а также разъем небулайзера и прочие детали. Вытрите устройство чистой медицинской марлей после очистки небулайзера. Не касайтесь центральной области мембраны чтобы не повредить ее. Соберите компоненты и храните устройство в соответствии с инструкциями.

Совет: После использования очистите прибор. Используйте 3 капли чистой воды и 1 каплю виноградного уксуса. Для оптимальной работы небулайзера.


Совет: Иллюстрация дана исключительно для справки, используйте общепринятые практики. Цвет может измениться без предварительного уведомления.

Комплектация



Описание прибора

1. Крышка
2. Чаша для лекарства
3. Насадка для распыления
4. Основной блок
5. Выключатель питания
6. Интерфейс USB
7. Контактные электроды

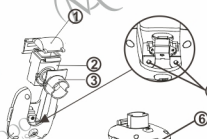

Срок гарантии - 1 год
 Срок службы: 3 года
 Срок годности: 5 лет

По вопросам ремонта, обращаться непосредственно в Центр Технического Обслуживания (ЦТО) Эксклюзивный дистрибутор в России ООО "Витта-Технолджи"

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а, тел.: +7 (495) 981-88-73, 8 800 550 9792

Фирма-импортер: ООО "Витта-Технолджи" 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47а, тел.: +7 (495) 981-88-73, 8 800 550 9792 www.vitta-ag.ru

Производитель:

FEELLIFE HEALTH INC.
 Room 1903, Building A, No.9 Furong Road, Tantou Community, Songgang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen 518104 Guangdong, China.

ФИЛЛАЙФ ХЕЛС ИНК.
 Оф. 1903, Здание А, Фурунг роуд 9, округ Танту, подокруг Сунган, район Баоан, Шеньжень 518104 Гуандун, Китай