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




Желаешь Дарсонваль известных фирм?

medstylepl

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.





ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ
РЕКОМЕНДУЕТ РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯТЬ
СВОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

CS
CS MEDICA

Измеритель
артериального
давления
CS Medica

CS-110 Premium

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас
за приобретение прибора
CS Medica CS-110 Premium!**

При покупке требуйте
правильного заполнения
гарантийного талона,
находящегося в середине
настоящего руководства
по эксплуатации.

**Манжета и камера для тонометра
CS-110 Premium не содержат латекса.**



CS-110 Premium

Благодарим Вас за покупку CS Medica CS-110 Premium. Приобретая этот тонометр, Вы делаете выбор в пользу высококачественного современного прибора.

CS Medica CS-110 Premium – традиционный механический тонометр, предназначенный для использования в медицинской практике: в больницах, поликлиниках, физиотерапевтических кабинетах, машинах скорой помощи.

Надежный, устойчивый к коррозии механизм тонометра гарантирует длительное использование прибора и корректные результаты измерения. Прибор производится в Германии и соответствует требованиям европейского стандарта EN1060 по неинвазивным приборам для измерения кровяного давления.

Манометр прибора снабжен увеличенным циферблатом с четкой оцифровкой. Манометр совмещен с нагнетателем (грушей), выполненным из эластичной резины с бархатистым покрытием, позволяющим производить нагнетание воздуха в манжету без особых усилий. Также в груше установлен воздушный клапан, снабженный сетчатым фильтром, который предохраняет механизм манометра и ниппеля (воздушного клапана) от попадания в них пыли и мелких частиц.

Механизм воздушного вентиля позволяет производить стравливание воздуха из манжеты с необходимой для измерения давления скоростью.

Металлические трубки оголовья фонендоскопа снабжены мягкими, эластичными оливами, которые плотно прилегают к ушным отверстиям, что создает дополнительный комфорт при измерении.

Прибор CS-110 снабжен профессиональной манжетой без фиксирующей скобы, которая может накладываться на плечо с длиной окружности 22-39 см, способ наложения – «внахлест». Манжета и камера для тонометра CS-110 Premium не содержат латекса.

