


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ингалятора Ромашка-2 БЭЗ

Устройство косметическое для воздействия на кожу лица влажным паром "Ромашка - 2 БЭЗ", предназначено для проведения процедур по очистке и оздоровлению кожи лица и шеи, проведения ингаляций на основе запаривания целебных трав для укрепления здоровья и профилактики простудных заболеваний, а также ароматерапии с эффектом увлажнения воздуха в помещении,

### Описание.

1. Колпак.
2. Обрамление
3. Насадка для ингаляции.
4. Насадка для рассеивания пара и ароматизации (насадка РПА).
5. Соединительный узел.
6. Заглушка.
7. Седло.
8. Ванночка.
9. Корпус.
10. Световой индикатор.
11. Выключатель.
12. Мензурка.
13. Шнур соединительный.
14. Клапан для понижения температуры пара.

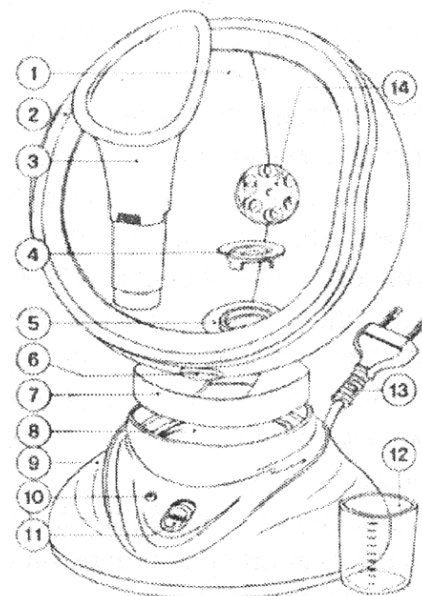

### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надёжное заземление.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны.
- Не кладите и не храните прибор там, откуда он может упасть в ванну или раковину.
- Не помещайте и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь сразу достать прибор, если он упал в воду. Сначала отключите его от сети. Сделайте это немедленно.
- Никогда не помещайте прибор на мягкую поверхность, например на кровать или диван. Всегда ставьте прибор на твёрдую ровную поверхность.
- Никогда не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии дремоты.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Не держите лицо близко к испарителю, так как Вы можете получить ожог горячим паром.
- Не пользуйтесь прибором, если на лице имеются открытые раны.
- Не пользуйтесь прибором после любого рода хирургических операций на горле или лице, включая стоматологические с использованием местных анестезирующих средств.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если: у вас температура, или какие-либо воспалительные процессы, боли или Вы находитесь под присмотром врача или принимаете лекарства.
- Не включайте прибор без налитой в ванночку воды, так как это существенно сократит срок его службы.
- Во избежание попадания в лицо горячих брызг кипящей воды не пользуйтесь прибором без насадки РПА
- По завершении процедуры прибор должен быть отключен от электросети.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время паровой процедуры Ваша кожа должна ощущать приятное тепло. Не следует погружать лицо в область пара, вызывающую жжение. При мытье, корпус прибора запрещается погружать в воду или ополаскивать под струёй проточной воды.
- Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.


### Особенности.

- Регулирование угла наклона колпака.
- Возможность регулировать насыщенность пара при косметической процедуре и ингаляции.
- Индикация включения в сеть.


- Возможность запаривания целебных трав непосредственно в ванночке.
- Аромотерапия с использованием эфирных масел.
- Ароматизация с эффектом увлажнения воздуха в помещении.

### Перед первым использованием.


- Выньте прибор из упаковки.
- Присоедините седло к колпаку (рис. 2), установите в отверстие насадку РПА (рис. 3). Налейте в ванночку одну мензурку воды, что соответствует 60 мл (рис. 4). Установите колпак с седлом и насадкой на корпус прибора (рис. 5). Вставьте вилку в розетку электросети, включите прибор выключателем (рис. 6). При этом индикатор будет светиться, что говорит о работающем нагревателе.

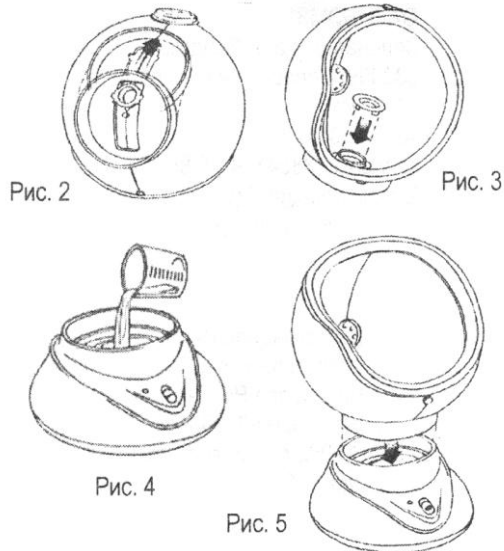

- На панели рядом с клавишей выключателя знаком "Г" обозначено "включено", "О" - "отключено".
- Чтобы сохранить причёску во время принятия процедуры - уберите волосы под косынку, полотенце и т. п.
- После закипания воды поверните колпак так, чтобы Вам было удобно принимать процедуру (рис.7).
- Теперь опустите лицо в колпак (рис. 8).

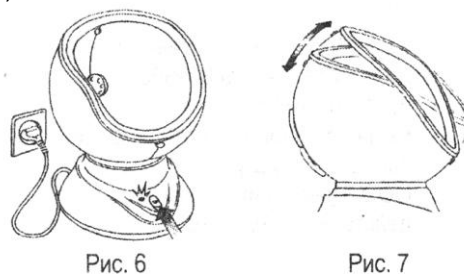


- При этом найдите оптимальное положение, чтобы температура пара была для Вас приемлемой или просто поверните колесико клапана (рис.9) в любую сторону до совмещения отверстий. При этом часть пара будет выходить наружу, По окончании процедуры отключите прибор и выньте вилку из розетки электросети.

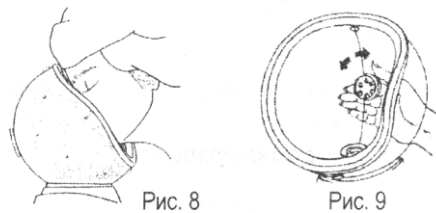

### Эксплуатация.

- Для ингаляционной процедуры налейте в ванночку 1-2 мензурки воды или приготовленного отвара лекарственных трав.
- Подготовьте насадку для ингаляции (см. рис. 1, поз. 3), которая состоит из двух частей - втулки и раструба. Соедините обе части, как показано на (рис. 10). Двигая раструб относительно втулки, увеличиваются или уменьшаются продольные прорезы на втулке. Это важное обстоятельство прямо влияет на температуру пара. В насадке сдвинутой до упора, прорезы минимальные, при этом пар будет более теплым, а в раздвинутой на всю длину прорезей - менее тёплым.

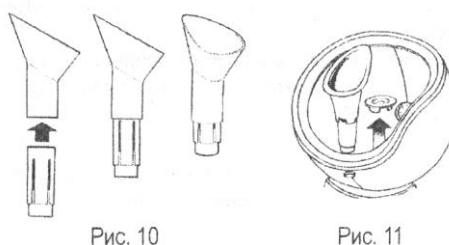

- Из колпака удалите насадку РПА, а на её место установите ингаляционную (рис. 11). Поместите колпак с трубкой на корпус. Включите прибор, и после закипания воды вдыхайте пар носом или ртам (рис. 12).

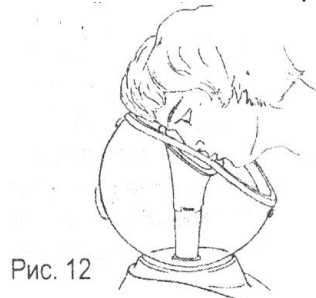


Рис. 12

- Дышите плавно, не спеша, так как резкий вдох или выдох провоцирует выброс большой порции пара, а это приводит к неприятному ощущению-жжению, По окончании процедуры отключите прибор выключателем и отсоедините от электросети. Использование лекарственных средств или лечебных трав возможно только по совету врача.
- Время проведения процедуры ингаляции не более 10 мин.

### **Аромотерапия.**

Аромотерапия обладает лечебно-профилактическим эффектом.

Это метод терапии с применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм посредством вдыхания, а также через кожу. Процесс ароматизации чрезвычайно прост. Налейте в ванночку одну мензурку воды (рис. 4). В колпак установите насадку РПА, а на её доньшко нанесите 2-3 капли эфирного масла. Включите прибор.

Через 4 минуты вода закипит и пар, проходя через насадку РПА, нагревает ее металлическое дно и способствует интенсивному испарению масла. Опустите лицо в колпак.

Пар, омывая кожу лица, "раскрывает" и очищает поры одновременно, насыщая их целебными испарениями эфирного масла.

Вдыхание паромасляной смеси также эффективно способствует профилактике и оздоровлению организма.

Использование того или другого эфирного масла для лечения и профилактики исключительно по рекомендации врача.

В процессе проведения процедуры водяной пар с частицами эфирного масла увлажняет воздух помещения, наполняя его приятным ароматом.

**Время проведения процедуры ароматерапии не более 5 минут.**

### **Очистка и уход.**

- Чтобы прибор служил долго и исправно следует соблюдать простые правила пользования и ухода.
- После очередной процедуры снимите колпак, слейте из ванночки остаток воды, выньте из колпака насадку РПА, отсоедините седло, если была использована ингаляционная насадка, разделите её на две части.
- Все детали промойте и высушите.
- Корпус прибора, после остывания ванночки, протрите влажной хорошо отжатой салфеткой.
- Если прибором пользовался больной, детали прибора нужно подвергнуть дезинфекции. Для этого протрите их салфеткой, смоченной в растворе, приготовленном из расчёта 10-15 мл. 3% перекиси водорода и чайной ложки моющего средства (стиральный порошок) на пол-литра воды. Раствор с деталей смойте чистой водой. С корпуса остатки раствора удалить, смоченной в чистой воде и отжатой салфеткой, повторив операцию 2-3 раза.

### **Хранение.**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.
- Храните набор в безопасном, сухом месте.

### **Технические характеристики.**

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 85Вт

Емкость ванночки: 0,125л

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*