

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стетофонендоскоп (тип Раппапорт) модели «CS Healthcare

модель **CS-421»**

производства фирмы

Wenzhou Longwan Dekang

Medical Instrument Co., Ltd (КНР)



**При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине
настоящего Руководства по эксплуатации!**

Благодарим Вас за покупку!

Вы по достоинству оцените важные отличия стетофонендоскопов торговой марки «CS Healthcare» с аналогичными моделями. Многофункциональность – стетофонендоскоп поставляется в комплекте с дополнительными принадлежностями, обеспечивающими возможность при использовании.

Удлиненные трубки (56 см) не ограничивают свобод Ваших движений. Вы и Ваш пациент чувствуете себя более комфортно при осмотре.

Лучшие акустические характеристики, достигнутые благодаря использованию более мягкой резины и усовершенствованной технологии при изготовлении трубок, позволят Вам легко различить самые незначительные отличия в тонах и шумы.

Индивидуальная адаптируемость стетофонендоскопа (наличие взаимозаменяемых внутриушных наконечников различного размера) избавит Вас от неприятных ощущений при постоянном использовании стетофонендоскопа. Нагрудные части в форме колокола (3-х размеров) поставляемые в дополнение к 2 оригинальным диафрагмам (большой и малой) обеспечивают многофункциональность комплекта. Каждая диафрагма или колокообразная чашечка служат для определенной цели, а вместе они охватывают все области применения. Таким образом, благодаря 5-ти вариантам рабочей комплектации стетофонендоскоп заменяет все остальные стетофонендоскопы.

- **БОЛЬШАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ДИАФРАГМА** обеспечивает высокую разрешающую способность при аускультации сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также внутренних органов брюшной полости
- **МАЛАЯ ДИАФРАГМА** предназначена для, прослушивания сердца у детей, когда в сердцебиении преобладают высокие тона. КОЛОКОЛООБРАЗНАЯ ЧАШЕЧКА ВЗРОСЛОГО размера очень полезна для точного определения низких и средних тонов или шумов.
- **ЧАШЕЧКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА** позволяет сконцентрировать звук в узких, небольших участках (например, в межреберных промежутках). Предназначается для прослушивания низких и средних тонов или шумов.
- **ЧАШЕЧКА ДЕТСКОГО РАЗМЕРА** прекрасно подходит для осмотра детей и подростков. Низкие и средние тона, а также шумы детского сердца хорошо улавливаются этой чашечкой. Вы убедитесь, что все названные комбинации хорошо продуманы, а высокая чувствительность стетофонендоскопа позволяет Вам четко выслушивать тоны сердца, а также легко слышать даже самые слабые шумы. Дополнительные внутриушные наконечники трех размеров позволят Вам выбрать наиболее подходящую для Вас пару и чувствовать себя комфортно при частом пользовании стетофонендоскопом.

Как пользоваться стетофонендоскопом

- Прибор работает в одном из двух положений головки. Переключение прибора на работу с диафрагмой или с колоколообразной чашечкой осуществляется поворотом головки стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка.
- Легкое постукивание пальцем по диафрагме позволит Вам определить в каком положении установлена головка стетофонендоскопа.
- Если Вы не услышали звука при постукивании, поверните головку стетофонендоскопа на 180 градусов до щелчка.
- Повторите постукивание по диафрагме, и Вы услышите звук. Прибор готов к работе с диафрагмой. При необходимости работы с колоколообразной чашечкой повторите вышеизложенные действия.
- Теперь Вы можете проводить осмотр при помощи стетофонендоскопа.

Комплект поставки

1. Нагрудная часть с малой и большой диафрагмой 1 шт.
2. Бинауральные хромированные трубки с черными пластиковыми наконечниками среднего размера для ушей I пара
3. Трубки с усиленными стенками, соединенные металлической липсой 1 пара
4. Нагрудная часть в форме колокола (взрослая) 1 шт.
5. Нагрудная часть в форме колокола (средняя) 1 шт.
6. Нагрудная часть в форме колокола (детская) 1 шт.
7. Запасные внутриушные наконечники(большие и малые) 2 пары
8. Запасные пластиковые диафрагмы (большая и малая) по 1 шт.
9. Виниловая упаковка для принадлежностей 1 шт.

Стетофонендоскоп «CS Healthcare модель CS-421» производства фирмы «Венчжоу Лонгван Деканг Медикал Инструмент Ко., Лтд.» № 107 Ксиаоту Стрит, Хайбин Таун, Лонгван Дистрикт, Венчжоу Сити, Китай, соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Регистрационное удостоверение: ФС № 2004/1515 от 29.11.04 г.

ГОССТАНДАРТ РФ

Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертиформ ВНИИНМАШ»)

Сертификат соответствия № РОСС CN.МЕ20.А02313

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р.3)

СРОК ГАРАНТИИ 2 года

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 2 года

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон правильно заполнен продавцом, в частности, если имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
 - нарушения требований Руководства по эксплуатации;
 - наличия механических повреждений, попадания в аппарат влаги или возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями;
 - самостоятельного вскрытия измерительного прибора и его составляющих владельцем или третьими лицами.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные естественным износом составных частей измерительного прибора, имеющих ограниченный срок службы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

В соответствии с Законом «О защите прав потребителя» «...изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости **провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.**

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изготовитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара».

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

Дата обращения « _____ » _____ г.

Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю « _____ » _____ г.

Подпись
или штамп мастера _____ Работу принял _____
(подпись клиента)

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ «CS HEALTHCARE» В РОССИИ

Адрес и телефоны
Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»:
127006, Москва,
Воротниковский пер.,
д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)

Тел/факс:
(495) 699-40-64

E-mail: info@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»:
ежедневно с 9.30 до 18.00
(без перерыва на обед),
кроме сб., вс. и праздничных дней

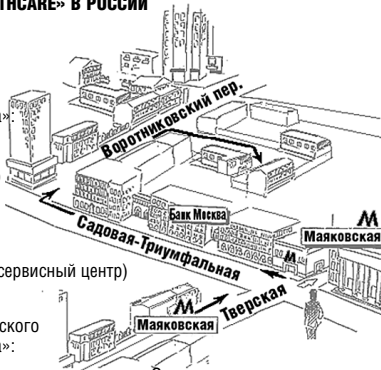


Схема расположения
Центра технического
обслуживания «СиЭс Медика»

- Архангельск, "СиЭс Медика Поморье", пр. Дзержинского, д. 8, корп. 1, оф. 3, тел.: (8182) 67-25-26, cspomor@atknf.ru
- Астрахань, "СиЭс Медика Астрахань", ул. Боевая, д. 134, оф. 2, тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Баку (Азербайджан), "Фарм Депо-22", ул. Внешне-Кольцевая, д. 4, тел.: (99412) 62-58-92, 62-84-41, eldargar@mail.ru
- Барнаул, "СиЭс Медика Алтай", ул. С-Западная, д. 171, тел/факс: (3852) 49-98-93, 60-14-31, cs-barnaul@mail.ru, gorkaev@barnaul.ru
- Белгород, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Пирогова, д. 45, тел.: (4722) 75-36-10, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Горького, д. 118, оф. 3, тел.: (4162) 51-52-16, csmedica@amur.ru
- Братск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bratsk.ru
- Владивосток, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), пр. 100-летия Владивостока, д. 56, к. 21, тел.: (4232) 37-00-57, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, "Ольвия", ул. Батурина, д. 39, оф. 303, тел.: (4922) 23-68-38, 37-31-64, medteh@olvia.vinfo.ru
- Волгоград, "СиЭс Медика Нижняя Волга", ул. Землянского, д. 7, оф. 17, тел.: (8442) 24-34-49, 23-13-06, csmedica34@mail.ru
- Вологда, "СиЭс Медика Вологда", ул. Чехова, д. 4, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@vologda.ru
- Воронеж, "СиЭс Медика Черноземье", ул. Грамши, д. 73"а", тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, "СиЭс Медика Урал", ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, med@csmedica-ural.ru
- Иваново, "СиЭс Медика Иваново", ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, филиал "СиЭс Медика Вятка" (Киров), ул. Молодежная, д. 96, тел.: (3412) 36-76-60, csm18@mail.ru
- Иркутск, "СиЭс Медика Восток", ул. Трилиссера, д. 87, оф. 8, тел.: (3952) 20-66-87, 20-51-41, vostok@csmedicairk.ru, market@omronirk.ru
- Йошкар-Ола, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Первомайская, д. 106, тел.: (8362) 42-65-81, csm@mari-el.ru
- Казань, "СиЭс Медика Татарстан", ул. Гвардейская, д. 16"б", тел.: (843) 295-39-78, 295-34-55, csmedica16@mail.ru
- Калининград, "СиЭс Медика Калининград", ул. Нарвская, д. 49 "е", оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, cs-medika@mail.ru
- Калуга, "СиЭс Медика Калуга", ул. Суворова, д. 21, оф. 31, тел.: (4842) 74-15-13, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, "СиЭс Медика Сибирь" (Новосибирск), Октябрьский пр-т, д. 39, тел.: (3842) 59-22-02, nikitin_cs@mail.ru

- Киров, "СиЭс Медика Вятка", ул. Солнечная, д. 15, тел.: (8332) 51-36-26, 51-36-25, cs43@mail.ru
- Краснодар, "СиЭс Медика Кубань", ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (861) 210-01-92, 210-01-35, cs_medica@kubannet.ru
- Красноярск, "СиЭс Медика Енисей", ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 602, тел.: (3912) 58-54-94, 21-24-83, 21-20-72, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Дубровинского, д. 1 "а-1", тел.: (4712) 52-05-09, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. 8 марта, д. 26 "а", тел.: (4742) 23-04-69, cs_lip@mail.ru
- Магнитогорск, филиал "СиЭс Медика Урал" (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 113/1, тел.: (3519) 29-49-14
- Минеральные Воды, филиал "СиЭс Медика Ставрополь", ул. Почтовая, д. 23 "а", тел.: (87922) 5-52-34
- Минск (Беларусь), Иностранное Предприятие "ВЛАТЕ-Групп", ул. Румянцева, д. 7, каб. 16, тел.: (+375 17) 294-51-28, 290-40-76, 294-51-28, viatek@yandex.ru
- Нижний Новгород, "СиЭс Медика Поволжье", ул. Торговая, д. 12, тел.: (831) 278-06-84, 278-06-89, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокuzнецк, "СиЭс Медика Сибирь" (Новосибирск), ул. Батюшкова, д. 14, тел.: (3843) 71-56-05, 35-94-92, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, "СиЭс Медика Сибирь", ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, "СиЭс Медика Омск", ул. Волочаневская, д. 15, корп. 1, тел.: (3812) 22-03-17, 51-54-21, csmedika_omsk@mail.ru
- Орел, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), Крамской пр.-д. 2, оф. 208, тел.: (4862) 72-61-01, orel-cs@mail.ru
- Оренбург, "СиЭс Медика Оренбург", ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 8, тел.: (3532) 78-08-16, 94-62-28, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево "Си Эс Медика Подмосковье", Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80-а, , тел.: (496) 412-64-27, csposdmoskovie@mail.ru
- Пенза, "СиЭс Медика Пенза", ул. М. Горького, д. 23, тел. (8412) 56-18-37, 56-15-01, csmedica58@mail.ru
- Пермь, "СиЭс Медика Пермь", ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, csperm@mail.ru
- Ростов-на-Дону, "СиЭс Медика Ростов-на-Дону", ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, csrostov@aanet.ru
- Рязань "СиЭс Медика Рязань", ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, "СиЭс Медика Самара", ул. Революционная, д. 70, стр. 1, оф. 24/2, тел.: (846) 267-31-00, 267-38-33, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, "СиЭс Медика Северо-Запад" (продажа и техническое обслуживание), ул. Тимуровская, д. 17, к. 3, тел.: (812) 715-88-93, 8 (904) 515-22-30, csmedica@skylink.spb.ru
- Саранск, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Васенко, д. 32, оф. 308, тел.: (8342) 27-03-24, csmedica@saransk.ru
- Саратов, "СиЭс Медика Саратов", ул. Орджоникидзе, д. 10 "а", тел.: (8452) 96-17-32, 94-84-47, csmsaratov@mail.ru
- Смоленск, "СиЭс Медика Смоленск", Хлебозаводской пер. д. 13, тел.: (4812) 64-79-07, cs-smolensk@bk.ru
- Ставрополь, "СиЭс Медика Ставрополь", ул. Ленина, д. 484а, оф. 116, тел.: (8652) 56-42-63, 56-40-95, csmedicastv@mail.ru
- Старый Оскол, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Тамбов, филиал "СиЭс Медика Черноземье" (Воронеж), ул. Чичканова, д. 17, тел.: (4752) 53-59-06, cs-tambov@mail.ru
- Тверь, "СиЭс Медика Тверь", пр-д Дарвина, д. 8, тел. (4822) 45-00-10, cs_medikatver@ocenter.ru
- Томск, "СиЭс Медика Енисей" (Красноярск), ул. Кулева, д. 32, оф. 110, тел.: (3822) 25-23-44, 42-44-28, tomsk@csmedicaenisey.ru
- Тула, "СиЭс Медика Тула", ул. Демонстрации, д. 19, тел.: (4872) 36-80-56, cs-tula@yandex.ru
- Тюмень, "СиЭс Медика Тюмень", ул. Амурская, д. 2/9, тел.: (3452) 30-48-17, cstumen@mail.ru
- Улан-Удэ, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101-102, тел.: (8422) 45-58-33, csmedica@mv.ru
- Уфа, "СиЭс Медика Башкортостан", ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (347) 234-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чебоксары, филиал "СиЭс Медика Поволжье" (Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 103, тел.: (8352) 21-24-08, 61-43-31, csmedica@chuvashia.ru, csmedica2@chuvashia.ru
- Челябинск, филиал "СиЭс Медика Урал" (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@omron-ural.ru
- Чита, филиал "СиЭс Медика Восток" (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, филиал "СиЭс Медика Ростов-на-Дону" (Ростов-на-Дону), ул. Ионова, д. 110 "а", тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53
- Ярославль "СиЭс Медика Ярославль", ул. Лисицына д. 3 "А", тел.: (4852) 48-66-53, 93-13-99, cs-yar@yandex.ru

Произведено по заказу и под контролем
ООО «СиЭс Медика»

Официальным представителем торговой марки «CS Healthcare»
в России является ООО «СиЭс Медика»
125413, Москва,
ул. Солнечногорская, 4
Тел. (495) 363-16-52, тел/факс (495) 363-16-56

E-mail: info@csmedica.ru,
service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru

**Бесплатная горячая линия по России:
8-800-555-00-80**